

# LIMPEZA E PREPARO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO



## APÓS ATENDIMENTO, FAZER UM FLUSH EM CADA LINHA (AR/ÁGUA)

Acionar cada sistema por 30 s em um saco plástico ou gaze para evitar dispersão de aerossóis

## FAZER A PRÉ LIMPEZA E ENVOLVER A CANETA EM UMA GAZE COM DETERGENTE ENZIMÁTICO

Deixar o produto agir no tempo recomendado pelo fabricante,




## ENXAGUAR BEM A CANETA

Para a cabeça utilizar gaze umedecida e no corpo usar água corrente

## SECAR BEM A CANETA

Utilizar panos limpos semi descartáveis

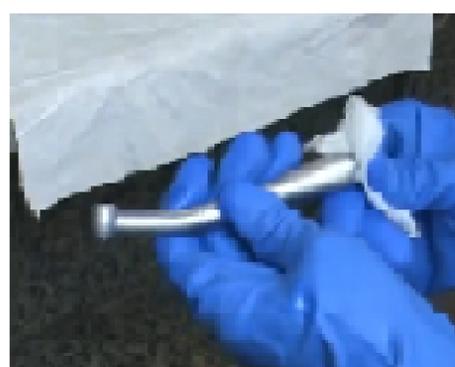

## LUBRIFICAR A CANETA E REMOVER O EXCESSO DE PRODUTO

Para isso, acione a caneta por 20 S protegendo a ponta com gaze e mantendo a linha de água fechada

## EMBALAR A CANETA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVOLVENDO A CABEÇA COM GAZE.

Antes do procedimento, higienizar e trocar as luvas de borracha por luvas de procedimento.



PARA MAIORES INFORMAÇÕES ASSISTA O VÍDEO E  
CONSULTE O POP ESPECÍFICO