

AÇÃO	EMPACOTAMENTO DE INSTRUMENTAL LIMPO EM EMBALAGENS DE SMS	POP Nº
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA	COBIO

Quem: Usuário da clínica proprietário do material limpo.

Quando: Ao término da limpeza do material.

Onde: Áreas de preparo de material das clínicas odontológicas.

Condições necessárias:

- EPI completo (Gorro, máscara, óculos, avental manga longa, luvas emborrachadas e sapato fechado);
- Instrumental limpo;
- Embalagem tipo SMS gramatura 50g na cor AZUL tamanho 40 x 40 cm ou 50 x 50 cm ou 60 x 60 cm;
- Etiqueta de identificação do pacote;
- Fita adesiva de uso hospitalar;
- Fita adesiva colorida (cor de acordo com o semestre cursado);
- Luvas de procedimento;
- Caixas de inox perfuradas com tampa;
- Recipientes perfurados, próprias para esterilização de materiais em autoclave a vapor (bandejas, estojo odontológico, broqueiro.);
- Protetores de extremidades nos objetos perfuro cortantes;
- TNT na cor BRANCA íntegro gramatura mínima de 50g de uso único.

Resultado esperado: Acondicionamento correto do material limpo posterior a esterilização.

Descrição do trabalho:

- 1- Higienizar as mãos conforme POP específico;
- 2- Paramentar conforme POP específico;
- 3- Certificar-se de que todo o material a ser embalado está limpo e seco;
- 4- Separar os materiais por pacote, de acordo com a padronização da CME;
- 5- Acondicionar o instrumental dentro das caixas, observando:
 - Dimensionamento da quantidade de instrumental com o tamanho da caixa (preenchimento máximo de 75% da capacidade) integridade do pacote;
 - Pinças e tesouras e afins devem estar abertos com protetores, de forma a facilitar a penetração do vapor;
 - Encaixar os protetores nas extremidades do instrumental perfuro cortante com auxílio de uma pinça ou cobrir o fundo e laterais das caixas com TNT (na cor BRANCA) de uso único gramatura mínima de 50g;
- 6- Dimensionar o tamanho do SMS (na cor AZUL) de acordo com o tamanho da caixa, de maneira que

AÇÃO	EMPACOTAMENTO DE INSTRUMENTAL LIMPO EM EMBALAGENS DE SMS	POP Nº
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA	COBIO

possibilite a execução da Técnica em Envelope;

7- Fazer o pacote de acordo com a técnica de envelope, fechando-o com a fita adesiva de uso hospitalar;



Técnica de Empacotamento em Envelope:

1-Posicionar o material diagonalmente no centro da embalagem;

2-Dobrar a ponta voltada para o usuário, levando-a até o centro do pacote, cobrindo o material e realizando uma dobra na ponta;

er

3-Trazer uma das laterais até o centro do pacote, deixando uma dobra na ponta;

4-Realizar o mesmo procedimento na outra lateral, de modo que as duas pontas cubram todo o pacote;

5-Completar o pacote, levando a quarta e última ponta até o centro do pacote;

6-Fechar a caixa com fita adesiva hospitalar;

PACOTE PRONTO



AÇÃO	EMPAOTAMENTO DE INSTRUMENTAL LIMPO EM EMBALAGENS DE SMS	POP Nº
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA	COBIO



- 8- Afixar a etiqueta de identificação do pacote (modelo em anexo) com a fita adesiva de uso hospitalar;
- 9- Colar na parte superior direita da etiqueta a fita adesiva colorida, de acordo com o período cursado pelo usuário;
- 10- Desparamentar conforme POP específico;
- 11- Higienizar as mãos conforme POP específico;
- 12- Encaminhar a caixa para a CME em caixa fechada, preservando a integridade da embalagem.

Importante:

- **Observar a integridade do envelope antes de iniciar o empacotamento;**
- **Manter os pacotes prontos em ambiente limpo, seco e em caixas fechadas até que os mesmos cheguem até a CME;**
- **Acomodar os materiais com lúmen de fundo cego inclinado com a boca no nível mais baixo e materiais pesados;**
- **O acondicionamento do instrumental deverá ser realizado em áreas próprias, ou seja, na área de empacotamento das clínicas da FAO-UFMG.**

Data	Atividade	Nome	Cargo/função	Rubrica
05/11/2014	Elaborado por	Aline Fernandes	Enfermeira	
22/04/2015	Revisado por	Ana Cristina Roma	Enfermeira	
12/06/2017	Revisado por	Ana Cristina Roma	Enfermeira	
12/01/2018	Revisado por	Ana Cristina Roma Renata Soraia Duarte Nilma de J. Apolinário Simone C. Machado	Enfermeira Aux. de Enfermagem Técnica Higiene Dental Aux. de Enfermagem	
02/02/2019	Revisado por	Estela F. Fernandes Aldeir Pereira Riguetti Vera Lúcia Lobo Marcelle Cristina S. Oliveira Vanilza Maria Duarte	Aux. de Enfermagem Aux. de Enfermagem Técnica Higiene Dental Aux. de Enfermagem Aux. de Enfermagem	
26/03/2020	Revisado por	Maria Cristina Vieira	Técnica de Enfermagem	
21/09/2020	Revisado por	Hélio Geraldo de Almeida Marcelle Cristina S.Oliveira	Aux. de Enfermagem Aux. de Enfermagem	

Referências Bibliográficas:


 <p>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</p>	<p>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	
<p>AÇÃO</p>	<p>EMPACOTAMENTO DE INSTRUMENTAL LIMPO EM EMBALAGENS DE SMS</p>	<p>POP Nº</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>	<p>COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA</p>	<p>COBIO</p>

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012. **Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.** Brasil, 15 mar. 2012. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html>. Acesso em: 10 março, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Informe Técnico n.01/09. **Princípios básicos para limpeza de instrumental cirúrgico em Serviços de Saúde.** Brasília; 2009. Disponível em: <www.anvisa.gov.br/servicodesaude>. Acesso: agosto/2010.

SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico. **Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização.** Práticas recomendadas SOBECC. 7ª ed. São Paulo: SOBECC, 2017.

ANEXOS: Etiqueta padrão

	<p>CME / COBIO – FOUFMG</p>
<p>Nº _____</p>	<p>PERÍODO/CURSO: _____</p>
<p>USUÁRIO: _____</p>	
<p>CONTEÚDO: _____</p>	
<p>Lote: _____ Esteriliz: _____ Validade: _____</p>	
<p>Operador: _____</p>	