
 <p>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</p>	<p>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	
<p>AÇÃO</p>	<p>LIMPEZA DOS SUGADORES E CUSPIDEIRAS PÓS ATENDIMENTO</p>	<p>POP Nº</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>	<p>COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA DA FAO</p>	<p>COBIO</p>

Quem: Estudantes de Graduação e Pós Graduação do curso de Odontologia.

Quando: Ao término de cada atendimento de pacientes no equipamento odontológico.

Onde: Clínicas Odontológicas e Núcleo de Cirurgia.



Condições necessárias:

- EPI completo (Gorro, máscara cirúrgica ou respirador, óculos, protetor facial, avental impermeável de manga longa, luvas emborrachadas e sapato fechado);
- Água corrente;
- Gaze não estéril;
- Pinça ou espátula.

Resultado esperado: Manter o sistema de sugadores limpos, evitando formação de biofilme, contaminações cruzadas e entupimentos dos condutos.

Descrição do trabalho:

- 1- Higienizar as mãos, conforme POP específico;
- 2- Colocar os EPIs, conforme POP específico;
- 3- Limpar a sujidade aparente da cuspideira com gaze não estéril e água corrente;
- 4- Sugar 1 L de água em cada sugador (saliva e cirúrgico), acionando por 2 minutos (5 jatos) o sistema de água para cada sugador;
- 5- Retirar os filtros, fazer a limpeza com auxílio de uma pinça ou espátula e enxaguar com água corrente da cuba do equipo, caso necessário;
- 6- Verificar a regularidade da sucção e acionar a equipe técnica de manutenção, se o fluxo estiver diminuído;
- 7- Desprezar os resíduos em local apropriado, conforme orientação da Gestão de Resíduos;
- 8- Higienizar as luvas de borracha (com álcool 70%) e deixá-las secar, antes de retirá-las e guardá-las;
- 9- Retirar os demais EPIs, conforme POP específico;
- 10- Higienizar as mãos, conforme POP específico.

 UFMG UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	 COBIO FO UFMG
AÇÃO	LIMPEZA DOS SUGADORES E CUSPIDEIRAS PÓS ATENDIMENTO	POP Nº
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA DA FAO	COBIO

Data	Atividade	Nome	Cargo/função	Rubrica
10/01/2018	Elaborado por	Maria Cristina Ayres	Técnico Enfermagem	
14/10/2019	Revisado por	Ana Cristina Roma Barbara Silva M. Matoso Ana Carolina M. Medeiros Viani	Enfermeiras	
21/09/2020	Atualizado por	Barbara Silva M. Matoso	Enfermeira	
30/10/2020	Revisado por	Ana Cristina Roma Figueiredo	Enfermeira	
04/11/2020	Revisado por	Luciana Guilherme Gonzaga Carmo	Auxiliar de Enfermagem	



Referências bibliográficas:

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfície**. Brasília: Anvisa, 2012. Disponível em: <https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/manuais>. Acesso em: 13/02/2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Hospital das Clínicas. Protocolo Unidade de Vigilância em Saúde e Qualidade Hospitalar/11/17. **Limpeza e Desinfecção de superfícies**. Belo Horizonte. 2017.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO. **Controle de Infecção e Biossegurança**. CRO – Conselho Regional de Odontologia – Seção Paraná. Curitiba, 2012. <<http://www.cropr.org.br/uploads/arquivo/42cd1c7049af88dca8f9135d8c04b274.pdf>> Acesso em:

ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA. **Recomendações AMIB/CFO para atendimento odontológico COVID- 19: Comitê de Odontologia AMIB/CFO de enfrentamento ao COVID-19**. Departamento de Odontologia AMIB – 1º Atualização 25/03/2020. Disponível em: https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/marco/26/2603Recomendacoes_AMIB-CFO_para_atendimento_odontologico_COVID19_atualizada.pdf. Acesso em: 26/07/2020.

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
AÇÃO	LIMPEZA DOS SUGADORES E CUSPIDEIRAS PÓS ATENDIMENTO	POP Nº
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA DA FAO	COBIO

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica N° 04/2020. **Orientações para Serviços de Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Novo Corona vírus (SARS-CoV-2).** Atualizada em 31/03/2020. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em: 26/07/2020