


|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
|                            | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL<br/>PADRÃO</b>                            |  |
| <b>AÇÃO</b>                | <b>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS LUVAS DE<br/>BORRACHA COM ÁLCOOL 70%</b> | <b>POP Nº</b>  |
| <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b> | <b>COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA</b>                                      | <b>COBIO</b>   |

**Quem:** Alunos, professores e servidores técnico-administrativos em educação da Faculdade de Odontologia.

**Quando:** Após uso das luvas de borracha (ao término de cada procedimento).

**Onde:** Expurgo das Clínicas Odontológicas e Núcleo de Cirurgia.


**Condições necessárias:**

- EPI (máscara ou respirador);
- Água e sabão neutro;
- Compressa cirúrgica ou pano descartável (wiper);
- Álcool 70%;
- Luvas de borracha.

**Resultado esperado:** Manter os equipamentos de proteção individual reutilizável – Luvas de borracha, limpas e desinfetadas, de modo a garantir conforto e segurança para o usuário.

**Descrição do trabalho:**

- 1- Higienizar as mãos;
  - 2- Paramentar conforme POP específico;
  - 3- Borrifar o detergente neutro nas mãos enluvadas para ensaboá-las;
  - 4- Realizar o enxágue em água corrente;
  - 5- Secar as luvas manualmente, utilizando uma nova (o) compressa ou pano descartável;
  - 6- Borrifar álcool 70% nas luvas de borracha e realizar a desinfecção por meio de fricção (mínima de 30 segundos);
  - 7- Retirar as luvas puxando pelas pontas dos dedos e acondicioná-las em caixa plástica, previamente desinfetada com álcool 70%;
  - 8- Descartar as compressas ou panos, conforme recomendações da Gestão de Resíduos;
  - 9- Retornar ao setor (Clínicas Odontológicas ou Núcleo de Cirurgia);
  - 10- Higienizar as mãos conforme POP específico;
  - 11- Desparamentar conforme POP específico;
  - 12- Higienizar as mãos.
- **Observação:** A compatibilidade dos produtos químicos utilizados na limpeza e desinfecção pode variar de acordo com o equipamento de proteção individual utilizado. Portanto, recomenda-se observar as instruções de cada fabricante.

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
|                            | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL<br/>PADRÃO</b>                            |  |
| <b>AÇÃO</b>                | <b>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS LUVAS DE<br/>BORRACHA COM ÁLCOOL 70%</b> | <b>POP Nº</b>  |
| <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b> | <b>COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA</b>                                      | <b>COBIO</b>   |

| <b>Data</b> | <b>Atividade</b> | <b>Nome</b>                  | <b>Cargo/função</b>   | <b>Rubrica</b> |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 27/07/2020  | Elaborado por    | Bárbara da S. Mourthé Matoso | Enfermeira            |                |
| 21/09/2020  | Revisado por     | Ana Cristina Roma Figueiredo | Enfermeira            |                |
| 23/09/2020  | Revisado por     | Aline de Cássia B. Contarini | Técnica de Enfermagem |                |

### **Referências Bibliográficas:**

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. *Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfície*. Brasília: Anvisa, 2012. Disponível em: <<https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/manuais>>. Acesso em: 26/07/2020.

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica Nº 04/2020. Orientações para Serviços de Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2). Atualizada em 31/03/2020. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em: 26/07/2020.

Conselho Federal de Odontologia. Biossegurança e desinfecção de materiais de moldagem e moldes para profissionais de prótese. Cirurgiões-dentistas e TPD. Disponível em: <http://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Manual-Desinfeccao-1.pdf>. Acesso em: 26/07/2020.

Conselho Regional de Odontologia do Ceará. Os passos do atendimento odontológico em tempos de Covid-19. Fortaleza. 2020. Disponível em: <https://universodaodontologia.pling.net.br/CROCE/os-passos-do-atendimento-odontologico-em-tempos-de-covid19/170707>. Acesso em: 26/07/2020