
	<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	
<p align="center">AÇÃO</p>	<p align="center">INDICADOR QUÍMICO CLASSE I COM INDICADOR (FITA DE AUTOCLAVE)</p>	<p align="center">POP Nº</p>
<p align="center">RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>	<p align="center">ANA CRISTINA ROMA FIGUEIREDO</p>	<p align="center">SETOR/CME</p>

Quem: Auxiliar de Enfermagem, Técnico(a) de Enfermagem, Técnico(a) em Saúde Bucal e Enfermeiro(a).

Quando: Em todos os pacotes a serem esterelizados.

Onde: CME.

Condições necessárias:

- Fita de autoclave classe I com indicador (observar data de validade);
- Cortador de fita;
- Pacote a ser esterelizado.

Resultado esperado:



- Sinalizar e garantir segurança e qualidade do processamento de produtos para saúde;
- Prevenir infecções;
- Prevenir eventos adversos relacionados ao processamento inadequado dos produtos críticos, semi-críticos e não críticos para saúde.

Não conformidade:

- Caso não ocorra a coloração uniforme da fita, todo material deve ser recolhido e reprocessado.
- Acionar o serviço de manutenção corretiva.
- Avaliar lote, validade da fita e contactar fabricante.

Descrição do trabalho:

1. Fixar 10cm da fita de autoclave classe I com indicador na etiqueta em cada pacote a ser esterelizado junto á etiqueta de identificação;

 <p>FAO UFMG FACULDADE DE ODONTOLOGIA</p>	<p>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	 <p>Coordenação técnica CME FAO-UFMG</p>
<p>AÇÃO</p>	<p>INDICADOR QUÍMICO CLASSE I COM INDICADOR (FITA DE AUTOCLAVE)</p>	<p>POP Nº</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>	<p>ANA CRISTINA ROMA FIGUEIREDO</p>	<p>SETOR/CME</p>

Data	Atividade	Nome	Cargo/função	Rubrica
12/01/2018	Elaborado por	Ana Cristina Roma Renata Soraia Duarte Nilma de J.Apolinário Simone C. Machado	Enfermeira Aux. de Enfermagem Técnica Higiene Dental Aux. de Enfermagem	
02/02/2018	Revisado por	Estela F.Fernandes Aldeir Pereira Riguetti Vera Lúcia R.lobo Marcelle Cristina S.Oliveira Vanilza Maria Duarte	Aux. de Enfermagem Aux. de Enfermagem Técnica Higiene Dental Aux. de Enfermagem Aux. de Enfermagem	
08/01/2020	Revisado por	Danielle de Paula Pires Alcione Soares Batista Patrícia Dias S. Madureira Nilma de Jesus Apolinário	Aux. de Enfermagem Aux. de Enfermagem Aux. de Enfermagem Técnica Higiene Dental	
24/04/2020	Revisado por	Ana Cristina R. Figueiredo	Enfermeira	

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC n.15, de 15 de março de 2012. **Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.** [legislação na internet]. Brasília; 2012. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Orientações gerais para central de esterilização. Brasília; 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Informe Técnico n.01/09. Princípios básicos para limpeza de instrumental cirúrgico em Serviços de Saúde. Brasília; 2009. Acesso: agosto/2010. Disponível em: www.anvisa.gov.br/servicodesaude.

SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico. **Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização.** Práticas recomendadas SOBECC. 7ª ed. São Paulo: SOBECC, 2017.